

Hyabak®

Este produto é um dispositivo médico. Por favor, leia as instruções antes de usar. Conserve este folheto. Você pode precisar ler novamente.

INDICAÇÕES

HYABAK é indicado para umedecer e lubrificar os olhos e lentes de contato.

Apenas uso ocular.

ADEQUADO PARA

- Adultos,
- Usuários de qualquer tipo de lentes de contato.

Observe que duas referências diferentes do HYABAK estão disponíveis em todo o mundo. No momento, você está usando a referência T1557, conforme indicado na embalagem exterior. Se você adquirir o HYABAK no exterior, verifique se esta referência é adequada para você. Por favor, leia atentamente as contraindicações antes de usar.

CONTRAINDICAÇÕES

Não injete e não engula. Não use HYABAK se você é alérgico a algum de seus componentes (consulte a Descrição do dispositivo).

DESCRIÇÃO DO DISPOSITIVO

HYABAK é uma solução oftálmica composta por hialuronato de sódio (0,15%), cloreto de sódio, trometamol, ácido clorídrico e água para injetáveis.

HYABAK é uma solução estéril, isenta de fosfatos, isotônica e com pH neutro.

A solução é fornecida no frasco de doses múltiplas ABAK®. Este dispositivo inovador e patenteado fornece colírios através de um filtro de 0,2 µm, evitando qualquer contaminação bacteriana da solução sem o uso de conservantes.

Portanto, HYABAK é suave para os olhos, pois é livre de conservantes. A ausência de conservantes permite a proteção dos tecidos oculares e também não causa reações aos usuários sensíveis aos conservantes.

BENEFÍCIO, DESEMPENHO E MECANISMO DE AÇÃO

HYABAK é recomendado para umedecer e lubrificar os olhos em caso de sensação de secura ou olhos cansados causados por fatores externos, como vento, fumaça, poluição, poeira, calor seco, ar condicionado, viagens aéreas, trabalho prolongado na frente da tela do computador. Proporciona alívio imediato e deixa os olhos mais confortáveis durante o dia.

O HYABAK também é recomendado para usuários de lentes de contato. Lubrifica e hidrata a lente, facilitando a colocação ou remoção e o desgaste do contato ao longo do dia.

O principal ingrediente do HYABAK é o hialuronato de sódio, um polissacarídeo natural encontrado no olho humano que retém a água para hidratar e lubrificar a superfície do olho. Mantém a solução na superfície dos olhos, proporcionando um alívio duradouro e reduzindo o tempo de cicatrização da superfície ocular.

RECOMENDAÇÕES GERAIS PARA USO

Não é necessário nenhum treinamento específico para usar o HYABAK.

Lave bem as mãos antes de usar. Não use nenhuma ferramenta para abrir o frasco.

Ao usar o HYABAK pela primeira vez, você verificará que a primeira

gota leva mais tempo para sair devido ao sistema de filtragem exclusiva do frasco (Não corte o bico dosador, você deve esperar a gota cair espontaneamente) (consulte Descrição do dispositivo). Tampe o frasco após o uso.

Para umedecer e lubrificar os olhos:

Dosagem: 1 gota em cada olho, quantas vezes for necessário durante o dia.

Aplique uma gota na bolsa da pálpebra, enquanto puxa cuidadosamente a pálpebra inferior e olha para cima. Feche os olhos suavemente após a aplicação.



Para lubrificar e hidratar a lente:

Dosagem: 1 gota em cada lente ao colocá-las e removê-las, e também quantas vezes for necessário durante o dia.

Antes de aplicar sua lente de contato, basta aplicar uma gota no interior da lente quando ela estiver em seu dedo.

Coloque suas lentes como de costume e pisque os olhos algumas vezes para permitir que a solução assente, garantindo uma distribuição uniforme de HYABAK sobre os olhos e a superfície das lentes de contato.



PRECAUÇÕES DE USO

Produto de uso múltiplo para um único paciente.

Não compartilhe frascos entre pessoas diferentes para evitar a contaminação cruzada.

Verifique se a embalagem está intacta antes de usar este produto pela primeira vez.

Verifique se o anel inviolável do frasco está intacto antes de usá-lo pela primeira vez.

Para evitar contaminação, não toque a ponta do frasco em qualquer superfície.

Você deve entrar em contato com um profissional de saúde se seus sintomas piorarem ou não melhorarem.

ADVERTÊNCIAS

Manter fora da vista e do alcance das crianças.

Após o uso, não conduza ou utilize máquinas se a sua visão estiver embaçada: aguarde alguns minutos para que a sua visão se recupere.

Aguarde pelo menos 10 minutos entre o uso de dois produtos oculares diferentes.

Nunca dilua o HYABAK ou misture-o com outras soluções.

Após a primeira utilização, se exposta a baixa pressão atmosférica, o frasco pode vazar.

Gravidez

Não existem dados adequados sobre o uso de hialuronato de sódio em mulheres grávidas. Seu uso apenas é recomendado na gravidez se seu médico avaliar que os benefícios superam os possíveis riscos.

Não há dados sobre a excreção do hialuronato de sódio no leite materno humano.

Paciente pediátricos

A eficácia e segurança do uso de hialuronato de sódio em crianças não foram estabelecidas.

REAÇÕES ADVERSAS

As seguintes reações adversas foram relatadas: possibilidade rara de irritação ocular leve e vermelhidão ocular. Nesses casos, os usuários de lentes de contato devem remover suas lentes de contato.

Ao usar colírios, você pode sentir sintomas incômodos, como sensação de queimação, sensação de picada, sensação de corpo estranho nos olhos e visão turva por um curto período de tempo.

Se você observar reações adversas ou sensações incomuns após o uso deste produto, entre em contato com um profissional de saúde e relate as informações ao distribuidor local, ao fabricante ou à sua Autoridade de Saúde local (consulte os contatos no final da instrução de uso).

CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO E DESCARTE

Armazenar entre 8 °C e 30 °C. Não exponha seu produto à luz solar direta ou umidade. Não utilize após o prazo de validade impresso no frasco e na caixa exterior.

O prazo de validade refere-se ao último dia do mês, desde que a embalagem esteja intacta e tenha sido armazenada corretamente. O produto pode ser usado até 3 meses após aberto. Após esse período, descarte o produto restante com responsabilidade. Descarte o produto de forma responsável e de acordo com as orientações locais (o frasco deve ser descartado como lixo doméstico, a caixa externa e o folheto são recicláveis).

Data de emissão e versão das instruções de uso:
Ver. 2 (BR) 04/2021

Fabricante:

 Laboratoires Théa
12 rue Louis Blériot
63017 Clermont-Ferrand
Cedex 2 França
www.laboratoires-thea.com
« Contact us » seção

Importado e distribuído por:
UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S/A
Registro ANVISA
Nº 80424140002
Rod. Fernão Dias – BR 381,
KM 862,5
Distrito Industrial do Algodão
Pouso Alegre – MG
CNPJ: 60.665.981/0009-75
SAC 0800 011 1559
Indústria Brasileira

Farm. Resp.:

Florentino de Jesus Krenças
CRF-SP: 49136

Fabricado por:

FARMILA – THEA FARMACEUTICI
S.P.A.
Via E. Fermi, 50 – 20019
Settimo Milanese – Milão
Itália

REF	T1557
-----	-------

SIGNIFICADO DOS PICTOGRAMAS NA EMBALAGEM

	Fabricante
	Dispositivo Médico
	Número de lote
	Consultar instrução de uso
	Data de fabricação
	Paciente único - Uso múltiplo
	Prazo de validade
	Não use se a embalagem estiver danificada
	Limite de temperatura
	Precauções
	Esterilizado usando técnicas de processamento asséptico
	Número de catálogo