



INSTRUÇÕES DE USO

THEALOZ® DUO

Este produto é um dispositivo médico. Por favor leia as instruções antes de utilizar.
ConsERVE este folheto. Você pode precisar ler novamente.

INDICAÇÕES

THEALOZ®DUO é uma solução sem conservante, indicada para a proteção, hidratação e lubrificação dos olhos para o tratamento da síndrome do olho seco ou «Doença do olho seco» de moderada a grave.

Apenas para uso oftálmico

ADEQUADO PARA

- Adultos
- Crianças: os pais ou cuidadores devem administrar o produto
- Mulheres grávidas ou amamentando tendo em conta o conhecimento atual
- Usuários de qualquer tipo de lente de contato

CONTRAINDICAÇÕES

Não injetar e não engolir o produto.
Não utilize THEALOZ® DUO se você é alérgico a algum dos componentes (consulte a composição do dispositivo).

DESCRIÇÃO DO DISPOSITIVO

THEALOZ® DUO é uma solução oftálmica composta por trealose (3%), hialuronato de sódio (0,15%), cloreto de sódio, trometamol, ácido clorídrico e água para preparações injetáveis.
THEALOZ® DUO é uma solução estéril, isenta de fosfatos, conservantes, hipotônica e de pH neutro.
A solução é fornecida no frasco de doses múltiplas ABAK®. Este dispositivo inovador e patenteado fornece

colírios através de um filtro de 0,2 µm, prevenindo assim qualquer contaminação bacteriana da solução, sem o uso de conservantes.

Desta forma, THEALOZ® DUO é suave para os olhos, uma vez que não possui conservantes. A ausência de conservantes permite a proteção dos tecidos oculares e evita reações em usuários sensíveis aos conservantes

BENEFÍCIOS, DESEMPENHO E MECANISMO DE AÇÃO

THEALOZ® DUO é recomendado em casos de desconforto, sensação de corpo estranho ou irritação do olho. Estes sintomas podem ser provocados por fatores externos, tais como, vento, fumaça, poluição, poeiras, ambientes frios ou ensolarados, calor seco, ar condicionado, viagens de avião, longos períodos de trabalho frente a um monitor de computador e cirurgias oculares tais como cirurgia refrativa e cirurgia de catarata.

THEALOZ® DUO é livre de conservantes, sendo bem tolerado pelos olhos. A solução pode ser usada por usuários de lentes de contato que usam qualquer tipo de lente de contato. O produto proporciona um conforto imediato que dura o dia todo.

Os principais componentes de THEALOZ® DUO são a trealose e o hialuronato de sódio.

A trealose é uma substância natural presente em muitas plantas e animais, que lhes permite sobreviver em condições de secura extrema. A trealose proporciona propriedades de proteção e hidratação.

O hialuronato de sódio, presente de forma natural no olho humano, absorve a água, assegurando a hidratação e lubrificação da superfície do olho. O hialuronato de sódio mantém a solução na superfície do olho proporcionando um alívio duradouro e reduzindo o tempo de cicatrização da superfície ocular.


A associação única de trealose e hialuronato de sódio em THEALOZ® DUO protege, hidrata e lubrifica a superfície do olho por um longo tempo e com o máximo conforto.

RECOMENDAÇÕES GERAIS PARA O USO

Posologia: 1 gota em cada olho, 4 a 6 vezes por dia.
THEALOZ® DUO pode ser usado com lentes de contato. Não é necessário qualquer treinamento específico para utilizar THEALOZ® DUO.

- Lave cuidadosamente as mãos antes de utilizar o produto.
- Não utilize qualquer acessório para abrir o frasco.
- Evitar tocar com a extremidade do frasco nos olhos ou nas pálpebras, especialmente se tiver alguma infecção ocular.
- Ao utilizar o produto pela primeira vez, você verificará que a primeira gota, leva mais tempo para sair, devido ao sistema de filtragem exclusiva do frasco (não corte o bico dosador, você deve esperar a gota cair espontaneamente).
- Gotejar uma gota no saco conjuntival inferior (o espaço entre o olho e a pálpebra), enquanto puxa suavemente a pálpebra inferior para baixo e olhar para cima. Feche os olhos suavemente após a aplicação.
- Coloque a tampa de volta após o uso.

Use somente nos olhos.

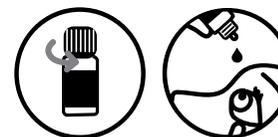



PRECAUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Produto de utilização múltipla para um único paciente. Não compartilhe frascos entre pessoas diferentes para evitar a contaminação cruzada. Verifique se a embalagem está intacta antes da primeira utilização deste produto. Verifique se o anel de segurança da tampa do frasco está intacto antes da primeira utilização. Para evitar qualquer contaminação, não toque com a ponta do frasco em qualquer superfície. Você deve entrar em contato com um profissional de saúde se os seus sintomas piorarem ou não melhorarem.

ADVERTÊNCIAS

Mantenha fora da vista e do alcance das crianças. Após a utilização, não conduza ou utilize máquinas se a sua visão estiver turva: aguarde alguns minutos até que a sua visão recupere totalmente. Aguarde pelo menos 10 minutos entre a utilização de dois produtos oftálmicos diferentes. Nunca dilua o THEALOZ® DUO e não o misture com outras soluções. Após a primeira utilização, se sujeito a baixa pressão atmosférica, o frasco pode vaziar.

REAÇÕES ADVERSAS

As seguintes reações adversas foram relatadas: possibilidade rara de irritação ocular leve e vermelhidão ocular. Caso você utilize lentes de contato e apresente essas reações as lentes devem ser removidas. Ao usar soluções oftálmicas, você pode ter sintomas que provocam incômodos, tais como, sensação de queimação, sensação de picada, sensação de corpo estranho nos olhos e visão turva, durante um curto período de tempo. Se você observar reações adversas ou qualquer sensação

estranha após a utilização deste produto, por favor entre em contato com um profissional de saúde e relate as informações a União Química Farmacêutica Nacional S/A ou as Autoridades de Saúde locais.

CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO E DESCARTE

Armazenar o produto em temperatura entre 15°C e 30°C. Não exponha o produto à luz solar direta ou a umidade. Não utilize após o prazo de validade, que se encontra impresso no frasco e na embalagem exterior. O prazo de validade corresponde ao último dia do mês indicado, desde que a embalagem permaneça intacta e tenha sido armazenada corretamente.

O produto pode ser utilizado por até 3 meses após aberto. Após este prazo, descarte o produto remanescente de forma responsável e de acordo com as orientações locais (o frasco deve ser descartado como lixo doméstico e a caixa externa e o folheto são recicláveis).

Data de emissão e versão das instruções de uso: Ver.4 11/2019.

Lote, Data de fabricação e Prazo de Validade: vide cartucho

Importado e distribuído por:

UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S/A

Registro ANVISA N° 80424140008

Rod. Fernão Dias – BR 381, KM 862,5 Distrito Industrial do Algodão

Pouso Alegre – MG

CNPJ: 60.665.981/0009-75

SAC 0800 011 1559

Indústria Brasileira

Farm. Resp.:

Florentino de Jesus Krencas

CRF-SP: 49.136

Fabricante:

FARMILA – THEA FARMACEUTICI S.P.A.

Via E. Fermi, 50 – 20019

Settimo Milanese – Milão Itália



Laboratoires Théa

12 rue Louis Blériot

63017 Clermont-Ferrand Cedex 2 Frankreich

www.laboratoires-thea.com

SIGNIFICADO DOS SÍMBOLOS DA EMBALAGEM

	Fabricante		Dispositivo Médico
	Número de lote		Consulte as instruções de utilização
	Data de fabricação		Paciente único – uso múltiplo
	Prazo de validade		Não utilize se a embalagem estiver danificada
	Limites de temperatura		Precauções
	Esterilizado utilizando técnicas assépticas de processamento		



N2762C10L25/0524